



### Philips DreamWear Full Face Maske

Standard-Maskenrahmen und 4  
Kissen

Keine Abdrücke auf dem  
Nasenrücken  
Freie Sicht und mehr  
Bewegungsfreiheit



HH1141/00

## Als wäre sie gar nicht da.\*

Das innovative Design von DreamWear Full Face ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

#### **Magnetclips**

- Die Kopfbandclips und Maskenkissen enthalten Magnete

#### **Freies Sichtfeld**

- Offenes Design bietet ein großes Sichtfeld

#### **Innovatives Design**

- Bewegungsfreiheit
- Modulares Design für mehr Optionen

#### **Komfortabel und benutzerfreundlich**

- Einfache Bedienung
- Weicher, flexibler Rahmen
- Mund-Nasen-Maskenkissen unter der Nase

# PHILIPS

## Full Face Maske

Standard-Maskenrahmen und 4 Kissen Keine Abdrücke auf dem Nasenrücken, Freie Sicht und mehr Bewegungsfreiheit

# Besonderheiten

### Bewegungsfreiheit



Dank der Platzierung des Schlauches oben am Kopf bietet DreamWear Full Face nachts mehr Bewegungsfreiheit. Nutzer gaben an, dass sie mit DreamWear Full Face eine beliebige Schlafposition einnehmen konnten.\*

### Nie wieder Druckstellen am Nasenrücken



Das innovative Design des unter der Nase aufliegenden Kissens verhindert Druckstellen, ein unangenehmes Tragegefühl und Hautreizungen auf dem Nasenrücken.\*\*

### Freie Sicht



Das offene Design erleichtert das Tragen einer Brille, das Lesen, das Fernsehen oder die Verwendung eines Computers oder Tablets vor dem Einschlafen.\*\*

### Kaum zu spüren



Der weiche, flexible Rahmen ist nachts angenehm zu tragen. Nutzerbeschreibungen zufolge ist die Maske kaum zu spüren.\*

### Auswahlmöglichkeit



Das modulare Design ermöglicht dem Benutzer die Auswahl des für ihn am besten geeigneten Maskenkissens bei gleichbleibendem Maskenrahmen.

### Einfache Bedienung



Nur wenige Teile für ein leichtes Zusammenbauen, Auseinandernehmen und Reinigen.

### Magnetclips

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Maske an Ihren Arzt. Manche Medizinprodukte werden ggf. durch Magnetfelder beeinträchtigt. Die Magnetclips in dieser Maske sollten mindestens 50 mm entfernt von aktiven Medizinprodukten, insbesondere von implantierten Geräten wie Herzschrittmachern, Defibrillatoren und Cochleaimplantaten, gehalten werden. Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.

HH1141/00

# Daten

### Warnung: magnetische Störungen

- Vorsicht bei Patienten mit Schrittmachern: Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Zur Verwendung bei Patienten > 30 kg: denen eine CPAP-Therapie verordnet wurde.

### Produktangaben

- Materialien: Nylon, Polyurethan-Schaum, Polycarbonat, Polyester, Silikon, Elasthan
- Garantie: 90 Tage
- Betriebsdruck: 4 bis 30 cmH2O
- Geräuschpegel: 17 dBA
- Anzahl der Teile: 7

### Reinigung: Kopfband, Schlauch

- Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel: Sorgfältig abspülen, zum Trocknen aufhängen<sup>1</sup>

### Reinigung: Maske

- Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel: Sorgfältig abspülen, an der Luft trocknen<sup>1</sup>

### Austausch

- Täglich auf Verschleiß prüfen: Bei ersten Anzeichen von Verschleiß ersetzen



Ausstellungsdatum  
2018-05-30

Version: 4.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Gemäß der Analyse der Daten einer Studie zu Patientenpräferenzen von August 2017 mit n = 85 und folgenden verschriebenen Masken: Resmed Airfit F10 und F20, Resprionics Amara View und F&P Simplus (basierend auf 10 Tagen Nutzung).  
\*\*\* Designversprechen – designbedingt kommt die Maske mit dem Nasenrücken nicht in Berührung.  
<sup>1</sup> Ausführlichere Reinigungsanweisungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.  
<sup>2</sup> Der Lieferumfang umfasst einen Standard-Maskenrahmen (Größe M) und vier Maskenkissen für alle Größen (S, M, MW, L). Das Schlaftherapiegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
<sup>3</sup> Die Kosten für DreamWear sind privat zu tragen und werden in der Regel nicht von gesetzlichen Krankenkassen erstattet.