



ResMed

AirCurve™ 10 **ST**



Mit dieser Taste gelangen Sie
jederzeit zur Startseite

Mit der Start/Stopp-Taste wird die
Therapie gestartet oder beendet

Der Bedienregler dient zur Navigation
und zum Einstellen von Optionen

Am Luftauslass wird der
Atemschlauch angeschlossen

Kurzanleitung
Deutsch

Lesen Sie vor dem Gebrauch die gesamte AirCurve™ 10 Gebrauchsanweisung durch.

Therapie vorbereiten




Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.



Stecken Sie den Stromversorgungsstecker auf der Rückseite des Gerätes ein. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil und der Steckdose.



Verbinden Sie den Atemschlauch fest mit dem Luftauslass an der Rückseite des Gerätes.

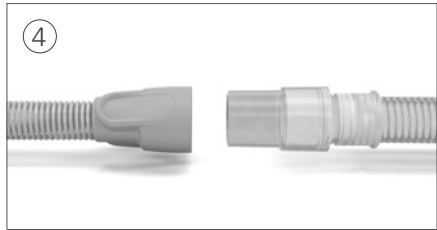

Verbinden Sie nun das Maskensystem fest mit dem freien Ende des Atemschlauches. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Therapie zu starten.

AirCurve 10 mit HumidAir

Wenn Sie ein AirCurve 10 Gerät haben, das mit einem HumidAir™ beheizbaren Befeuchter ausgestattet ist, füllen Sie den Befeuchter wie folgt:



Öffnen Sie den Befeuchter und füllen Sie Wasser bis zur Maximalmarkierung ein.



Schließen Sie den Befeuchter und schieben Sie ihn seitlich in das Gerät hinein.

Der beheizbare Befeuchter lindert trockene und verstopfte Atemwege und trägt zu einer komfortableren Therapie bei. Wenn Ihr AirCurve 10 Gerät nicht mit einem Befeuchter ausgestattet ist, kann für Sie ein HumidAir Befeuchter und ein ClimateLineAir™ beheizter Atemschlauch in Betracht kommen.

Therapie beginnen


Wenn Sie Ihr Gerät bisher noch nicht benutzt haben, müssen Sie sich eventuell eine Zeit lang an die Therapie gewöhnen. Das ist normal. Bei den meisten Patienten dauert es ein bis zwei Wochen, bis sie sich an den Luftdruck gewöhnt haben.

Beseitigung von Symptomen durch geänderte Komforteinstellungen


Wenn Ihnen die Gewöhnung an die Therapie schwerfällt, verwenden Sie die AirCurve 10 Komfortfunktionen, um besser ein- und durchschlafen zu können.

- **Schwierigkeiten beim Einschlafen** – Wenn Sie bei hohem Druck nur schwer einschlafen können, schalten Sie die Rampenfunktion ein bzw. verlängern sie die Rampe.
- **Aufgeblähtes Gefühl** – Wenn Sie sich etwas aufgebläht fühlen, weil Sie Luft schlucken, schalten Sie die Rampenfunktion ein bzw. verlängern sie die Rampe.
- **Zu wenig Luft** – Wenn Sie gefühlt zu wenig Luft bekommen, stellen Sie die Rampe auf Aus.


So ändern Sie die Rampe:

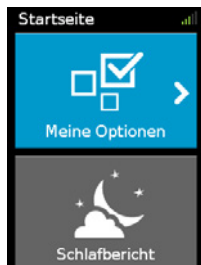


1. Drücken Sie auf den Bedienregler, um „Meine Optionen“ aufzurufen.

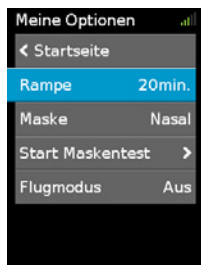

2. Drehen Sie am Bedienregler, bis „Rampe“ hervorgehoben wird, und drücken Sie dann den Bedienregler, um diese Option auszuwählen.

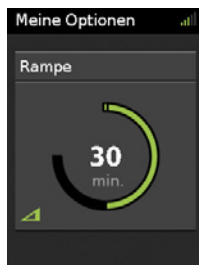

3. Drehen Sie am Bedienregler, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

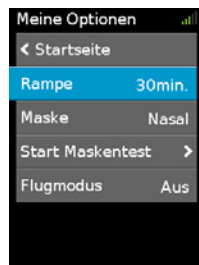

4. Drücken Sie auf den Bedienregler, um die geänderte Einstellung zu speichern.

Wenn Ihr AirCurve 10 Gerät mit einem HumidAir Befeuchter ausgestattet ist, stehen weitere Komfortfunktionen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Therapie komfortabler gestalten können.

- **Trockene oder laufende Nase** – Falls Ihre Nase trocken wird oder beginnt zu laufen, stellen Sie das Befeuchtungsniveau höher ein.
- **Wassertröpfchen (Kondensation)** – Falls sich Wassertröpfchen auf Ihrer Nase, an Ihrer Maske oder in Ihrem Atemschlauch bilden, stellen Sie das Befeuchtungsniveau niedriger ein.



Reinigung

1. Waschen Sie den Atemschlauch in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Er darf nicht in der Wasch- oder Spülmaschine gewaschen werden.
2. Spülen Sie den Atemschlauch gut ab und lassen Sie ihn vor direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt an der Luft trocknen.
3. Wischen Sie das Äußere des Gerätes mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Sie ein AirCurve 10 Gerät haben, das mit einem HumidAir Befeuchter ausgestattet ist, reinigen Sie den Befeuchter wie in Schritt 1 und 2 beschrieben. Zudem kann der Befeuchter in der Spülmaschine (nur im oberen Korb) im Schon- oder Gläserspülgang gewaschen werden. Er sollte nicht bei Temperaturen über 65 °C gewaschen werden.

Ausführliche Anweisungen zur Reinigung der Maske finden Sie in der Gebrauchsanweisung für die Maske.

Einzelteile regelmäßig prüfen und wechseln

Aus Komfort- und Gesundheitsgründen sollten Sie die Einzelteile und Verbrauchsmaterialien für Ihr Gerät regelmäßig prüfen und gegebenenfalls wechseln. Durch regelmäßige Wechsel der Einzelteile und Verbrauchsmaterialien tragen Sie dazu bei, dass Sie eine optimale und dauerhaft komfortable Therapie erhalten.

Ausführliche Anweisungen zur Prüfung des Gerätes finden Sie in der AirCurve 10 Gebrauchsanweisung.

Seriennummer	Gerätenummer
Typ und Größe der Maske	Setup-Datum
Notizen	